


Notice d'utilisation - Masques Barrières -Catégorie 1

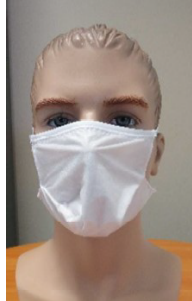

Vue de face



Vue latérale

Nos masques barrières blancs sont composés de 4 couches Polypropylène NT 19

- Les 4 couches sont certifiées **OEKO-TEX Standard 100 Classe II**

Valeurs aux tests (rapport DGA N°RP/20-2079/DGA MNRBC/2000305/NP) :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Respirabilité - Perméabilité à l'air (>96 pour dépression de 100 Pa) : | 806 L/m ² .s ⁻¹ |
| - Efficacité de filtration des particules de 3 µm émies (>90%) : | 95 % |

Ce dispositif est réservé à des usages non sanitaires.

Masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public.

AVERTISSEMENT : Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels (<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>).

Mode d'Emploi :

- Entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine, sans essorage à 60°C pendant 30 min minimum.
- Changer le masque toutes les 4 heures, ou lorsque le masque devient humide.

** Pas de blanchiment / Pas de séchage en machine / Ne pas repasser / Pas de nettoyage à sec*




Le port du masque barrière permet de limiter la projection de particules de la bouche ou du nez vers l'extérieur du masque.

Destiné à l'usage des personnes saines ne présentant pas de symptômes cliniques d'infection au COVID-19 et n'étant pas en contact avec des personnes présentant des symptômes.

Mise en place du masque barrière

Positionner le grand côté du masque vers le cou, et le petit côté vers le nez.

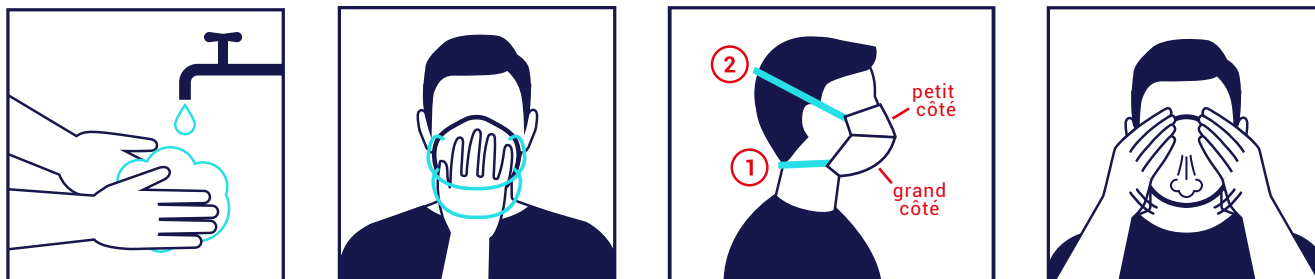

Retirer un masque barrière

Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Il est recommandé de se laver les mains (eau + savon ou solution hydroalcoolique), de retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les jeux de brides, sans toucher la partie avant du masque barrière.

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble, ou se laver les mains immédiatement après manipulation des masques.

Ne pas réutiliser un masque barrière souillé ou mouillé qui n'aurait pas été lavé. Ne jamais remettre en place un masque qui a été retiré du visage.

Jeter un masque barrière

Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d'un sac poubelle (de préférence avec couvercle et à commande non manuelle). Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure et afin d'éviter tout contact lors de la collecte.

Durée d'utilisation du masque barrière

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.



Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.